



INFORMACIÓN TÉCNICA



Magno Vest Alcohol es un investimento de etil-silicato que obtiene su dureza a través de la formación un gel, está diseñado específicamente para el duplicado de modelos en hidrocoloide y el revestido de modelos para removible

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con cromo-cobalto
- Alta expansión
- Duplicado perfecto
- Metales tersos
- Desvestido tan fácil como azúcar
- Fraguado rápido
- Calcinado rápido



Disponible en:

Cubetas de 18, 20 y 35 kg y cajas de 25kg

Especificaciones técnicas

Proporción polvo/ líquido I/Líquido II:	100g/10mL/10mL
Mezclado: Manual:	60 seg. / Automático: 45 seg.
Tiempo de trabajo:	3 min aprox.*
Tiempo de fraguado:	10 min aprox.*
Tiempo de fraguado final:	15 min aprox*
Expansión al fraguar:	1.1%
Expansión térmica:	1.2%
Tiempo para calcinar:	20 min aprox.*
Resistencia a la compresión:	2MPa
Temperatura ideal de trabajo:	25-30°C

*los valores dependen fuertemente de la temperatura ambiental

