



Tipo: 4

Yeso para elaboración de dados de Trabajo

Relación: Polvo = 100gr. Agua = 20ml.

Espatule manualmente de 60 a 90 segundos o mecánicamente a 350 rpm durante 20 ó 30 segundos.

- Tiempo de trabajo: 5 a 6 minutos
- Fraguado Inicial: 10 a 13 minutos
- Expansión: 0.18 a 0.20%
- Resistencia a la compresión seco: 15,000 psi ó 104MPA

Manténgase en lugar seco.